

UK NEQAS BTLP Antenatal Antibody Titration (ANT) Pilot

Scheme Istruzioni esercizio 23ANT4

Distribuito il 23/10/23 – Chiusura il 02/11/23

Materiale fornito - fare riferimento alla scheda COSHH fornita per le istruzioni di manipolazione dei campioni

<https://www.ukneqash.org/download/177/UKNEQASBTCOSHHGeneralInstructionsPDF>

- **Campioni di plasma** - centrifugare prima dell'uso
 - Un campione di plasma, etichettato Campione 1, per il quale si richiede la titolazione dell'anticorpo.
 - Prelevato da una donna durante lo screening antenatale di routine alla 12^a settimana di gestazione.
 - Assenza di Malattia Emolitica del Neonato (HDN) nelle due precedenti gravidanze andate a buon fine
 - Questa donna ha uno screening anticorpale positivo ed è stato identificato un anti-Fya.
 - Il partner della donna è risultato omozigote per l'antigene Fya.

Test e Registrazione risultati

I campioni devono essere trattati come campioni clinici.

Campione 1 Titolare l'anti-Fya utilizzando la tecnologia IAT che useresti con un campione clinico simile.

Selezionare delle cellule disponibili dalla vostra scorta locale di reagenti con cui effettuare la titolazione anticorpale.

Registrare la tecnologia utilizzata, la forza di reazione per ciascuna diluizione testata e il titolo riportato. Se si utilizza più di una tecnologia, registrare i risultati per la tecnologia principale utilizzata per riportare i risultati clinici.

Invio dei risultati

Inserire i vostri risultati tramite <https://www.ukneqasbtlp.org/distribution> ed assicurarsi di aver cliccato sul pulsante "Submit" nella pagina di inserimento dati. In questa fase, verrà visualizzato un riepilogo dei risultati inviati che potrà essere stampato per controllo e come registrazione dell'invio. Qualsiasi modifica successiva a questa data (e prima della data di chiusura) richiederà una richiesta ai responsabili dello schema per reimpostare la pagina Web per la nuova presentazione.

La distribuzione sarà chiusa sul web alla data / ora di chiusura pubblicate e tutti i risultati "salvati" ma non "inviati" saranno raccolti e valutati.

Le istruzioni per l'utilizzo del sito web per l'inserimento dei dati possono essere trovate alla pagina <https://www.ukneqash.org/downloads/ANT%20data%20entry%20instructions.pdf>

In caso di problemi con il materiale di esercitazione o per qualsiasi domanda riguardante il completamento dell'esercizio o la presentazione dei risultati, si prega di contattare il team BTLP per un consiglio.

Informazione aggiuntiva